

Der Kinderfuß

Sichelfußtherapie



schein
shoe service



Die Sichelfußtherapie



Der Fuß Ihres Kindes ist bei uns in besten Händen.

*Liebe Eltern,
mit Ihrer Wahl zu unseren therapeutischen Hilfsmitteln, die der Korrektur von Sichelfüßen dienen, haben Sie eine gute Entscheidung getroffen.*

Der kindliche Sichelfuß ist eine gut zu behandelnde Fehlstellung, die jedoch grundsätzlich so früh wie möglich therapiert werden sollte, um Folgeschäden vorzubeugen. Dabei kann bereits im Säuglingsalter die Sichelfußtherapie mit entsprechenden Korrekturmaßnahmen beginnen.

Medizinisch bedeutet dies, dass zum einen eine statische Korrektur des in Fehlstellung befindlichen Vorfußes erfolgt und zum anderen eine dynamisch-trainierende Korrektur zur Beseitigung der muskulären Dysbalance. Die Versorgungsbeispiele ziehen sich wie ein roter Faden vom Säugling bis hin zum Schulkind.

Mit unseren Antivarus-Schuhen profitiert Ihr Kind von unserer speziellen Erfahrung, die bis in das Gründungsjahr 1879 reichen. Seit mehr als 25 Jahren betreiben wir Forschung und Entwicklung im Segment der Antivarus-Schuhe und haben das kindgerechte Design wesentlich beeinflusst. Das Ergebnis spricht für sich. Wir sind heute Weltmarktführer und haben mehrere 100.000 Kinder erfolgreich während der Therapie begleitet.

Die besonderen Eigenschaften unserer Schuhe führen zu einer erfolgreichen konservativen Versorgung der Sichelfußstellung und erfüllen Ihre Erwartungen hinsichtlich Therapie, Tragekomfort und modischem Design.

*Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Wir sind gemeinsam mit dem Fachhandel für Sie da.
Ihr Schein Orthopädie Service Team*



Die Sichelfußtherapie

schein
shoe service

Baby-Sichelfußorthese

Die Sichelfußorthese ist in Schuhform aus weichem Leder gestaltet. Der Rückfuß wird zuverlässig zwischen der führenden Hinterkappe und dem breitflächigen Fußrückengurt gehalten. Die Orthese findet ihren Einsatz vorwiegend bei Säuglingen und Kleinkindern im Krabbelalter; danach wird diese als Nachtschiene bei den weiterhin redressionsbedürftigen Adduktus-Stellungen des Vorfußes eingesetzt.



Code-Nr.:
039101 - rechts
039102 - links

13 Größen von
80 bis 150 mm
(zum Gehen nicht geeignet)



Korrektur-Zubehör:
Die Baby-Sichelfußorthese wird mit montierter Feder in Normalspannung sowie 2 Federn für mittlere und maximale Spannung und einem Fixier-Element geliefert. Je nach Verordnung erfolgt die Umsetzung in eine dynamische oder fixierbare Korrektur.



BSF-Orthese

mit dynamischer Korrektur



mit fixierbarer Korrektur

Die Korrektur der Vorfuß-Fehlstellung erfolgt in Höhe der Lisfranc'schen Gelenklinie durch lateralen Federzug an der geteilten Orthesensohle. Die Führung des Vorfußes wird vom Schaft gesichert, der durch Spannrriemen verstärkt ist. Die Zehenpartie bleibt frei beweglich.

In Abhängigkeit vom Schweregrad der Kontraktur können die Zugfedern in unterschiedlichen Härtegraden eingesetzt werden.

Ist die Korrekturstellung des Fußes erreicht, so wird diese durch ein Fixier-Element als Federersatz fest eingestellt. Bei der Größenbestimmung ist auf volle Streckung des Fußes zu achten.



BSF-Schuh
mit Korrektur

Code-Nr.:
039501 - rechts
039502 - links

8 Größen von
80 bis 150 mm

Der Baby-Sichelfußschuh ist mit einer unveränderbaren Anti-Varus-Korrektur ausgestattet. Der Schaft wird durch eine entsprechende Kappe verstärkt. Diese Laufsohle ermöglicht auch das Stehen und Gehen.



BSF-Schuh in
Neutralstellung

Code-Nr.:
039506 - rechts
039507 - links

8 Größen von
80 bis 150 mm

Bei einseitiger Sichelfußversorgung kann der Sichelfußschuh in Neutralstellung für den gesunden Fuß eingesetzt werden.



Die Sichelfußtherapie

Sichel- und Klumpfußschienen

Die variable, passive Korrektur des kindlichen Sichelfußes oder vorbehandelten Klumpfußes mit verbliebener Adductusstellung kann mit diesen farbigen Polyethylen-Schienen leicht durchgeführt werden. Durch stabilen Sitz der Ferse kann der Mittel- und Vorfuß in der erforderlichen Weise nach lateral redressiert werden. Bei leichter Spitzfußkomponente wird mit einer zusätzlichen Oberschenkelfassung die 90°-Stellung im Knie zur Entlastung der Wadenmuskulatur erzielt.



15 Größen
von 7 bis 23 cm

① $\left\{ \begin{array}{l} \text{weiß} = \text{Code-Nr. 035270-} \\ \text{blau} = \text{Code-Nr. 035271-} \\ \text{rot} = \text{Code-Nr. 035272-} \end{array} \right.$

② $\left\{ \begin{array}{l} \text{weiß} = \text{Code-Nr. 035260-} \\ \text{blau} = \text{Code-Nr. 035261-} \\ \text{rot} = \text{Code-Nr. 035262-} \end{array} \right.$



Antivarus-Schuhe zur Korrektursicherung des kindlichen Sichelfußes und postoperativen Klumpfußes.

Die Wirkung der Antivarus-Schuhe beruht auf der bewährten 3-Punkte-Korrektur.

1. Der Rückfuß wird durch eine umfassende Fersenkappe aufrecht gehalten und vor Torsionswirkungen im Sprunggelenk bei der erforderlichen Vorfußkorrektur bewahrt.
2. Der laterale Druck am Kuboid entspricht dem Hypomochlion, um das der Vorfuß in die Korrekturstellung gedrängt wird. Deshalb ist dort der laterale Endpunkt der verlängerten Fersenkappe.
3. Der dritte Korrekturpunkt befindet sich vorn medial in Höhe des Großzehengrundgelenkes. Dort wird der Fuß daran gehindert, in die Fehlstellung zurückzuweichen. Die Indikation für die Antivarus-Schuhe ist bei der Behandlung gehfähiger Kinder mit Vorfuß-Adduktion, wie beim Sichel-, Serpentin- oder Klumpfuß, gegeben. Eine gezielte Wuchslenkung erfolgt durch die Form des Schaftes und die Größenzugabe.
4. Die Korrektur erfolgt bei einer Achsabweichung nach lateral von mindestens 8°.

5. Kassenabrechnung:

Hilfsmittelverzeichnis - Produktgruppe 31,
Pos.-Nr. 31. 03. 03. 6002
"Korrektursicherungsschuhe"





Antivarus-Schuhe

Hilfsmittelverzeichnis - Produktgruppe 31,
Pos.-Nr. 31.03.03.6002 'Korrektursicherungsschuhe'



Bine

AV - 041260 [37]
NS - 041265
18 - 29



Durch die Abnäher lassen sich die Riemen problemlos kürzen.

Einen optimalen Halt beim offenen Antivarus-Schuh bieten regulierbare Riemen mit Dornschnallen bzw. Klettverschlüsse.

Die verlängerte Hinterkappe geht weit über den Korrekturpunkt bis zum Großzehenglied hinaus.



Sky

AV - 041320 [5]
NS - 041325
18 - 38



Lava

AV - 041630 [1]
NS - 041635
18 - 35



Antivarus-Schuhe

Hilfemittelverzeichnis - Produktgruppe 31,
Pos.-Nr. 31. 03. 03. 6002 "Korrektursicherungsschuhe"

schein
shoe service



Sunny

AV - 041190 8
NS - 041195
18 - 35



Patrick

AV - 041530 9
NS - 041535
18 - 42



Rainbow

AV - 041780 6
NS - 041785
18 - 42



Antivarus-Schuhe

Hilfsmittelverzeichnis - Produktgruppe 31,
Pos.-Nr. 31.03.03.6002 'Korrektursicherungsschuhe'



Jim

AV - 041720
NS - 041725
18 - 42

7



Mareike

AV - 041250
NS - 041255
21 - 32

38



Kletty



Motiv austauschbar
(Druckknopf)

AV - 041240
NS - 041245
21 - 35

39



Antivarus-Schuhe

Hilfsmittelverzeichnis - Produktgruppe 31,
Pos.-Nr. 31. 03. 03. 6002 "Korrektursicherungsschuhe"

schein
shoe service



Raupe

AV - 042530 10
NS - 042535
18 - 35



Safari

AV - 040320 16
NS - 040325
18 - 29



Durch den hohen Schaft wird das untere Sprunggelenk fixiert und das obere Sprunggelenk stabilisiert.

Die Schaftpolsterung im Bereich des gesamten Rückfußes dient zur besseren Fixierung des unteren Sprunggelenks als Basis der Korrekturfunktion.

Mit der weiten Schnürung wird sichergestellt, dass sich die Druckbelastung auf dem Fußrücken gleichmäßig verteilt. Die Korrekturwirkung wird dadurch optimiert.

Durchgehende Kappenversteifung im medialen Korrekturbereich. Die verlängerte Hinterkappe ermöglicht eine gleichbleibende Korrekturwirkung.

Die im Schuh einliegende Sohle ist mit dem Weichpolstermaterial "Medifoam" beschichtet. Somit wird der Fuß in der Belastung weich gebettet. Bei Bedarf kann die Sohle entnommen und dadurch der Innenraum des Schuhs z. B. für eine Einlagenversorgung vergrößert werden.

Alle Modelle mit FLEKT



Antivarus-Schuhe

Hilfsmittelverzeichnis - Produktgruppe 31,
Pos.-Nr. 31.03.03.6002 'Korrektursicherungsschuhe'




Moon

AV - 040750 21
NS - 040755
18 - 38



Luna

AV - 040740 22
NS - 040745
18 - 35

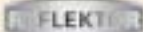Alle Modelle mit 



Größenmessung direkt am Fuß mit dem schein-Fußmessgerät

Das Messgerät von schein berücksichtigt die steigende Zehenzugabe in der Messskala und ist für alle therapeutischen Kinderschuhe von schein konzipiert.

(Messgerät nicht für Fremdfabrikate geeignet)

Auf der Rückseite des Gerätes ist die Weitentabelle der Orthesen- und Stabilschuhe abgebildet.



Code-Nr.
032640-001



Antivarus-Schuhe

Hilfemittelverzeichnis - Produktgruppe 31,
Pos.-Nr. 31. 03. 03. 6002 "Korrektursicherungsschuhe"

schein
shoe service



Spring

AV - 040170 ¹⁴
NS - 040175
18 - 38



Fire


AV - 040180 ¹⁵
NS - 040185
18 - 35



Vorderkappenschutz,
paarig lieferbar in der
Einheitsgröße 21 - 28,
Code-Nr. 040004-000.



Der Einsatz unterschiedlicher
Materialien in der Sohlenkon-
struktion unterstützt die Schock-
absorbierung. Außerdem sind
die neuen Laufsohlen wesent-
lich leichter und haben eine
gute Abriebfestigkeit.

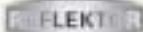Alle Modelle mit 



Antivarus-Schuhe

Hilfsmittelverzeichnis - Produktgruppe 31,
Pos.-Nr. 31.03.03.6002 'Korrektursicherungsschuhe'



Kim

AV - 040120 ⁴⁰
NS - 040125
18 - 38



Anna

AV - 040270 ⁴¹
NS - 040275
18 - 35

Alle Modelle mit





Antivarus-Schuhe

Hilfemittelverzeichnis - Produktgruppe 31,
Pos.-Nr. 31. 03. 03. 6002 "Korrektursicherungsschuhe"

schein
shoe service



Mika

AV - 040620 [27]
NS - 040625
20 - 42



Leo

AV - 040660 [28]
NS - 040665
18 - 42



Luka

AV - 042140 [25]
NS - 042145
18 - 42

Alle Modelle mit 



Antivarus-Schuhe

Hilfsmittelverzeichnis - Produktgruppe 31,
Pos.-Nr. 31.03.03.6002 'Korrektursicherungsschuhe'



Marco

AV - 042130 [26]
NS - 042135
18 - 38



Thomas

AV - 042150 [24]
NS - 042155
18 - 42

Alle Modelle mit 



Antivarus-Schuhe

Hilfemittelverzeichnis - Produktgruppe 31,
Pos.-Nr. 31. 03. 03. 6002 "Korrektursicherungsschuhe"

schein
shoe service



Sarah

AV - 040380 ¹⁹
NS - 040385
18 - 32



Lea

AV - 040390 ²⁰
NS - 040395
18 - 32



Pia

AV - 040290 ⁴²
NS - 040295
18 - 32

Alle Modelle mit 



Antivarus-Schuhe


Hilfsmittelverzeichnis - Produktgruppe 31,
Pos.-Nr. 31.03.03.6002 'Korrektursicherungsschuhe'



Lisa

AV - 040260 ⁴³
NS - 040265
18 - 29

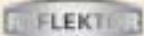

Alle Modelle mit 



Antivarus-Schuhe

Hilfemittelverzeichnis - Produktgruppe 31,
Pos.-Nr. 31. 03. 03. 6002 "Korrektursicherungsschuhe"

schein
shoe service



Street

AV - 040140 ⁴⁴
NS - 040145
20 - 42



Grashopper

AV - 040280 ⁴⁵
NS - 040285
18 - 29



Alle Modelle mit 



Antivarus-Schuhe

Hilfsmittelverzeichnis - Produktgruppe 31,
Pos.-Nr. 31.03.03.6002 "Korrektursicherungsschuhe"



Orion

AV - 042470 | 46
NS - 042475
18 - 38



Phoenix

AV - 042460 | 36
NS - 042465
18 - 42

Auch als Orthesen- und
Stabilschuh
erhältlich!



Alle Modelle mit 



Antivarus-Schuhe

Hilfsmittelverzeichnis - Produktgruppe 31,
Pos.-Nr. 31. 03. 03. 6002 "Korrektursicherungsschuhe"

schein
shoe service



Jupiter

AV - 042480 47
NS - 042485
23 - 42



Saturn

AV - 042190 29
NS - 042195
18 - 38

Alle Modelle mit 




Antivarus-Schuhe

Hilfsmittelverzeichnis - Produktgruppe 31,
Pos.-Nr. 31. 03. 03. 6002 'Korrektursicherungsschuhe'

Der Einsatz der 100 % wasserdichten und optimal atmungsaktiven Sympatex Membrane sorgt für zusätzlichen Tragekomfort. Durch die intelligente Materialkombination ist Bewegungsfreiheit bei jedem Wetter gewährleistet.



SYMPATEx

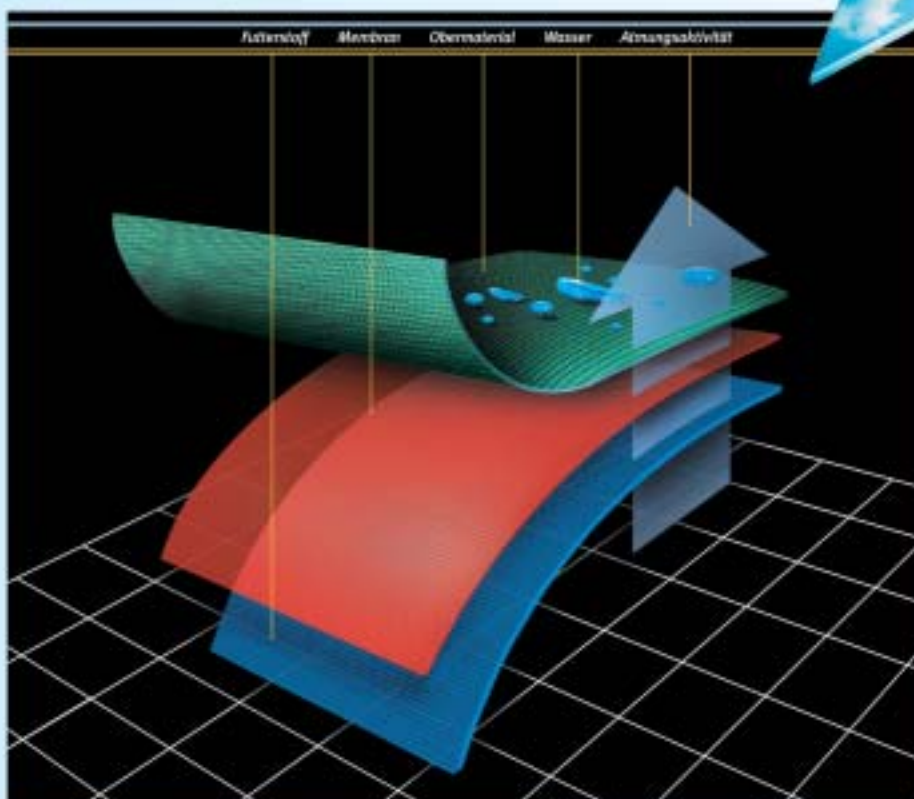



Antivarus-Schuhe

Hilfsmittelverzeichnis - Produktgruppe 31,
Pos. - Nr. 31. 03. 03. 6002 "Korrektursicherungsschuhe"

schein
shoe service

Extra hoch!



SYMPATex

AV - 042730 [32]
NS - 042735
18 - 38

mit Warmfutter

Tibet

Extra hoch!



SYMPATex

AV - 042740 [33]
NS - 042745
18 - 42

mit Warmfutter

Rocky



SYMPATex

AV - 042760 [34]
NS - 042765
18 - 42

mit Warmfutter

Alpen

Alle Modelle mit 



Antivarus-Schuhe

Hilfsmittelverzeichnis - Produktgruppe 31,
Pos.-Nr. 31. 03. 03. 6002 'Korrektursicherungsschuhe'

Extra hoch!

Montblanc



AV - 042800 [48]
NS - 042805
18 - 32
mit Warmfutter



Extra hoch!

Snow



AV - 042810 [49]
NS - 042815
18 - 38
mit Warmfutter



Alle Modelle mit 



Antivarus-Schuhe

Hilfsmittelverzeichnis - Produktgruppe 31,
Pos.-Nr. 31. 03. 03. 6002 "Korrektursicherungsschuhe"

schein
shoe service



Rain



AV - 042350 30
NS - 042355
18 - 38

ohne Warmfutter



Splash



AV - 042340 31
NS - 042345
18 - 32

ohne Warmfutter

Alle Modelle mit






Einlagen-Versorgung

Einlagen sind beim Einsatz von Therapie-schuhen für Kinder oft unerlässlich.

Die S90-Kindereinlagen bieten neben der dünnen, flexiblen Form auch eine hervorragende Stützwirkung und Stabilisierung des Rückfußes. Bei Kindern mit Tendenz zum Knickfuß ist eine bilaterale Fersenfassung mit 2-Backeneinlagen angezeigt. Operierte Klump- und Serpentinfüße können mit der schalenförmigen S90-Kindereinlage versorgt werden. Die flexiblen Einlagenränder passen sich dem Schuhschaft optimal an und verhindern Druckschwielen am Kinderfuß. Die vielen farnefrohen Bezugstoffe wurden speziell für Kinder entwickelt und erfreuen sich großer Beliebtheit.

Über weitere vielfältige Einlagenversorgungen mit anderen Materialien informiert Sie auch Ihr Orthopädie-Fachmann. Bei rigiden Sichelfüßen oder vorbehandelten Klumpfüßen mit einer verbliebenen Adduktusstellung des Vorfußes werden auch Dreibackeneinlagen mit vorgezogener medialer Backe eingesetzt, weil sie einen härteren Korrekturdruck durch das verwendete Trägermaterial Aluminium oder Supralen ausüben können. Damit der Fuß auch nach lateral korrigiert werden kann, muss das Kind Antivarus-Schuhe tragen, um den Vorfuß nicht in eine Zange zu nehmen.

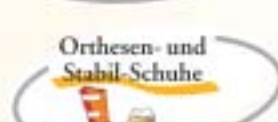

schein
shoe service

Schein Shoe Service
Postfach 11 06 09
D-42866 Remscheid
Germany

Tel. +49(0) 21 91 / 910-201
Fax +49(0) 21 91 / 910-102
E-Mail: info@schein.de
www.schein.de



099997-054

03.05.07 00.07.07